

PROCEDURA DE TESTARE pentru Testul Rapid Antigen COVID la fața locului

Procedura de testare a speciemenelor de tampon:

Pasul 1: Aduceți speciemenul și componentele testului la temperatura camerei (15-30°C) dacă este necesar.

Pasul 2: Adăugați soluția tampon de extracție a probei în tubul de extracție până când meniscul ajunge la linia orizontală gravată pe tub (~ 0,3 ml, 9-10 picături). Păstrați tubul în poziție verticală folosind suportul furnizat pentru tubul de extracție.

Pasul 3: Introduceți tamponul în soluția tampon de extracție din tub. Rotiți tamponul de cel puțin 5 ori. Presați tubul de tamponul scufundat de mai multe ori pentru a facilita extragerea speciemenului. Scoateți și aruncați tamponul într-un mod sigur.

Pasul 4: Atașați duza la tubul de extracție a probei care conține speciemenul extras. Speciemenul extras din tub este acum gata pentru testare.

Pasul 5: Scoateți caseta din pungă sigilată chiar înainte de testare. Așezați caseta pe o suprafață curată și plană. Etichetați caseta cu numărul de identificare al speciemenului.

Pasul 6: Întoarceți tubul și adăugați 3 picături (~ 80-90 μ L, la un interval de 1 secundă între ele) din speciemenul extras în godeul pentru probă al casetei prin strângerea ușoară a tubului.

Pasul 7: Setati temporizatorul.

Pasul 8: Citiți rezultatele după 15 minute. Rezultatele pozitive pot fi vizibile în doar 3 minute. Rezultatele citite după 20 de minute trebuie considerate nevalide și trebuie repetate cu un dispozitiv nou. Aruncați dispozitivele folosite ca deșeuri periculoase biologice în conformitate cu legile locale care reglementează eliminarea dispozitivelor.

Procedura alternativă pentru speciemenele introduse în VTM (mediul de transport pentru probe destinate detecției virale):

Adăugați 90 μ L din speciemenul introdus în VTM direct în godeul pentru probă al casetei și continuați cu pasul 7 de mai sus.

Notă: Această metodă este recomandată numai pentru probele introduse în VTM care nu conțin indicatori de pH deoarece culoarea ar putea interfera cu testul.

I, the undersigned, **PETER HAJNALKA**, authorized interpreter and translator for English, German and Hungarian language, pursuant to Authorization no. 22944/2010, issued by the Romanian Ministry of Justice, certify the accuracy of the translation carried out from Romanian into English language, that the presented text was entirely translated, without omissions and that the content and meaning of the document were not affected by the translation.

